

REREK – Vibrador Logopédico para Rotacismo y Lambdacismo

Neurotec · neurotec.es · Mayo 2026

1. Identificación del producto

Nombre comercial	REREK – Vibrador Logopédico para Rotacismo y Lambdacismo
Marca	REREK
Categoría	Vibrador logopédico orofacial
Precio (IVA incl.)	39,99 €
Marcado CE	Sí
Garantía	2 años
Colores disponibles	Rosa, verde lima, azul, rojo, violeta

2. Indicaciones terapéuticas

Indicación principal	Rotacismo / Lambdacismo
Indicaciones secundarias	Frenillo lingual corto (abordaje conservador), estimulación propioceptiva orofacial, rehabilitación de masticación y deglución, estimulación neuromotora
Población diana	Infantil y adultos. Sin restricción de edad superior
Ámbito de uso	Uso exclusivo por logopedas titulados y terapeutas del habla

3. Contenido del kit

Incluye	Cuerpo vibrador + 1 cuchara + 1 pila AA + estuche rígido de transporte
Cabezal incluido	1 cuchara para terapia del fonema /r/
Cabezales adicionales	Se adquieren por separado (ver sección 4)
Alimentación	1 pila AA (incluida)

4. Cabezales compatibles

Sistema	Modular intercambiable
Tipos compatibles	Cucharas /r/ (łyżeczki R), Cuchara Dura, Probe Tip, Preefer Tip, cabezales Oral, espátulas, mordedores Bite-n-Chew

5. Protocolo de uso en sesión

Tiempo máximo uso continuo	1-2 minutos sin interrupción
----------------------------	------------------------------

Ciclos recomendados	10-20 segundos de aplicación con pausas entre ciclos
Diagnóstico previo	Obligatorio. Evaluar condición anatómica lingual y sensibilidad oral del paciente antes del primer uso
Técnica principal /r/	Ápice lingual contra dientes superiores. Cabezal bajo lengua, a lo largo de línea central. Activar vibración y desplazar hacia atrás

6. Mantenimiento e higiene

Desinfección cabezal	Toallita desinfectante uso sanitario (alcohol 70%) o solución hipoclorito diluida
Desinfección cuerpo	Limpieza externa con toallita. No mojar compartimento pila
Prohibido	No sumergir en agua
Secado	Secar al aire antes de guardar en estuche

7. Productos relacionados en Neurotec

Pack Rotacismo	neurotec.es/producto/pack-para-rotacismo/
Cabezal Cuchara Dura	neurotec.es/producto/hard-spoon-tip/
Z-Vibe	neurotec.es/producto/z-vibe/
Vibrador SENSI	neurotec.es/producto/vibrador-sensorial-orofacial-sensi/
Novafon Pro	neurotec.es/producto/nuevo-novafon-pro-estimulacion-ondas-sonoras-base-de-carga-cabezales-intraorales/
El Maletín de la R	neurotec.es/producto/el-maletin-de-la-r/

AVISO DE USO PROFESIONAL

Este material está diseñado para uso exclusivo por logopedas titulados y terapeutas del habla. Su aplicación requiere diagnóstico previo de la condición anatómica lingual y la sensibilidad oral del paciente. No apto para uso doméstico sin supervisión profesional cualificada.